


1 Złożenie zestawu osobistego.

Zestaw osobisty zawiera:

- A- Lejek (PP 100°C), B- Filtr (PP/SILICON 100°C), C- Dren (SILICON 100°C),
D- Zawór (SILICON 100°C)

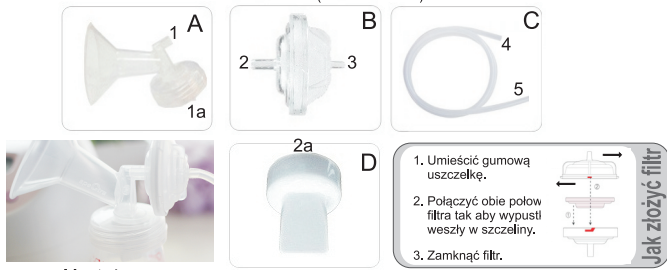

Montaż

Założyć zawór nr 2a (rys. D) w dolną część lejka nr 1a (rys. A) a następnie dokręcić butelkę. Umieścić szerszą końcówkę filtra nr 2 (rys. B) w otworze lejka oznaczonym nr 1 (rys. A). Dowolny koniec drenu nr 4 (rys. C) połączyć z drugim końcem filtra nr 3 (rys. B). Dren nr 5 wystarczy podłączyć do laktatora Spectra: [Spectra S2](#) [Spectra 9](#)

2 Podłączenie zestawu osobistego do laktatora.

Uwaga!- jeśli nie podłączamy dwóch zestawów, wówczas należy zasłonić jeden z kanałów. Drugi zestaw osobisty do nabycia jako akcesoria dodatkowe.



Dwa kanały do podłączenia zestawów osobistych

3 Podłączenie zasilania.



Gniazdo do podłączenia zasilacza (zasilacz w komplecie)
wyjście: 12V, 2A
wejście: 100V-240V ~ 50/60Hz 0,60A
Model: UE24WCP-12020SPA


4 Jak zmodyfikować zestaw osobisty na laktator ręczny.

Uwaga!- Do nabycia jako akcesoria dodatkowe.

Należy usunąć filtr a w jego miejsce umieścić komorę wraz z membraną i rączką.




SPOSÓB UŻYCIA ODCIĄGACZA

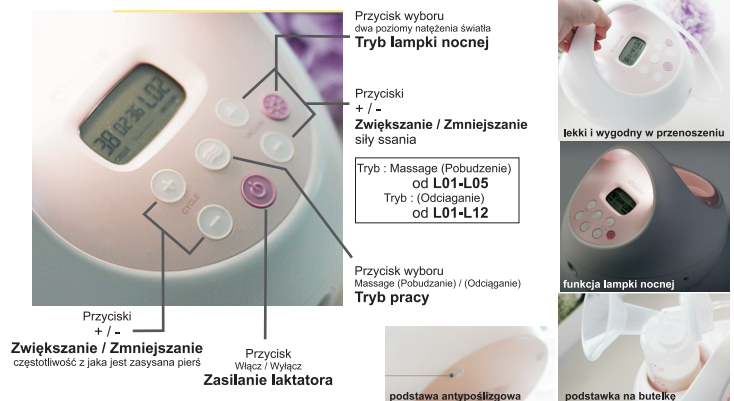

Przed użyciem odciągacza należy wyczyścić i wysterylizować jego części. Sposób sterylizacji przedstawiono w rozdziale "JAK CZYŚCIĆ I STERYLIZOWAĆ ODCIĄGACZ POKARMU" a w dziale "PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ODCIĄGANIA POKARMU" konieczne czynności związane z higieną i masażem piersi.

1. Należy usiąść wygodnie na krześle z prostym podparciem. Podczas odciągania pokarmu nie wstawać, nie nachylać się i nie wykonywać innych czynności.

Tylko pierwszy obrazek przedstawia prawidłową pozycję do odciągania pokarmu.

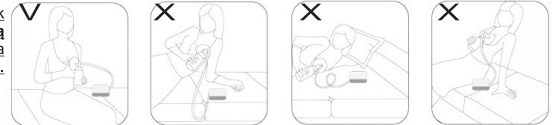

LOT: 2020-07



Wylądowy dystrybutor: SOLAMIS Marek Binienda

93-338 Łódź, PL, ul. Rzgowska 281/289, e-mail: tufi@tufi.pl www.tufi.pl tel./fax +48 42 645 34 29

Wytwarzca: UZINIMEDICARE CO. Rm. 105, Joongang Insua V, Sagimnagdo 137 Jungwon-Gu, Seongnam-si Gyeonggi-Do 462-807 South Korea Autoryzowany przedstawiciel: Obelis s.a. 34, Av. de Tervuren, bte 44 B-1040 Brussels, BELGIUM

KARTA GWARANCYJNA

- Firma SOLAMIS jako importer udziela gwarancji na sprawne działanie produktu na okres 12 miesięcy od daty zakupu, potwierdzonej na karcie gwarancyjnej. Gwarancji nie podlegają elementy zestawu indywidualnego i pozostałe akcesoria.
- Uszkodzony produkt należy przesłać w oryginalnym opakowaniu na adres dystrybutora zwykłą przesyłką pocztową na własny koszt.
- Wylądowy dystrybutor ustosunkuje się do żądania kupującego w terminie 14 dni od daty przyjęcia produktu do reklamacji. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą naprawiane bezpłatnie. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, okres naprawy może ulec przedłużeniu.
- Sposób naprawy produktu ustala udzielający gwarancji.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, samodzielnego dokonywania napraw.
- Gwarancji nie podlegają części i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.
- Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.
- Karta gwarancyjna bez przewidzianych w niej zapisów tj. czytelnej pieczęci i podpisu sprzedającego, daty sprzedaży oraz podpisu kupującego, jak również wpisów z napraw gwarancyjnych jest nieważna.
- Nieuzasadnione reklamacje będą odsyłane na koszt reklamującego.
- Przesłanie urządzenia do reklamacji przez kupującego jest równoznaczne ze znajomością oraz zaakceptowaniem warunków niniejszej gwarancji.

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE WYKONUJE PRODUCENT

Nazwa produktu	Data zgłoszenia naprawy	Data wykonania naprawy	Rodzaj naprawy	Podpis i pieczęć

.....
Data sprzedaży i podpis sprzedającego

.....
Czytelny podpis kupującego

Pieczęć sprzedawcy:

Zaznacz formę sprzedaży:

- ☐ Sprzedaż wysyłkowa
☐ Sprzedaż stacjonarna

SOLAMIS
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

W przypadku sprzedaży wysyłkowej (rekomendowanych na www.tufi.pl sklepów internetowych), reklamacje można wysłać bezpośrednio do wylądowego dystrybutora.

www.tufi.pl

tufi

Spectra S2 PLUS
Profesjonalny laktator



Laktator elektryczny

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Aby wyrób działał skutecznie podczas używania, należy stosować go zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. W celu uzyskania dodatkowych, należy zasięgnąć porady lekarza. Instrukcję należy zachować celu poprawnego używania wyrobu.



1,0 Kg

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarskimi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Data utworzenia: 01.07.2020

2. Włącz urządzenie.

Po podłączeniu zasilacza (prawy bok urządzenia) można włączyć laktator wystarczy nacisnąć przycisk oznaczony symbolem



3. Wybierz Tryb pracy.

Mamy do wyboru dwa tryby pracy. Urządzenie startuje w trybie właściwego odciągania pokarmu. Charakteryzuje się on możliwością dopasowania zarówno częstotliwości jak i siły ssania w bardzo szerokich zakresach. Daje to możliwość elastycznego dopasowania pracy laktatora do własnych potrzeb. Zaczynamy zawsze od najniższych poziomów. W każdej chwili możemy je zmodyfikować korzystając z przycisków oznaczonych .

Na początek odciągania zalecany jest tryb Massage, który odpowiada za masaż piersi i pobudzenie ich do laktacji. Ważną cechą tego trybu jest nie podrażnianie brodawek (brodawka nie jest wciągana tak głęboko do lejka). Uwaga!-w tym trybie jest tylko jeden cykl.



4. Wyłącz urządzenie z sieci.

Po zakończeniu odciągania wyłącz urządzenie naciskając przycisk . Jeśli zapomnisz wyłączyć laktator on sam wyłączy się po 30 minutach.

JAK PRZECHOWYWAĆ POKARM

W celu prawidłowego przechowywania pokarmu prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami:

- Przechowywać w lodówce używając wysterylizowanych naczyń (napęlnionych co najwyżej do 3/4 pojemności) opisanych datą odciągnięcia pokarmu.
- Jeśli pokarm będzie wykorzystany w ciągu 3, 4 dni, powinien być umieszczony w lodówce w miejscu najbardziej stabilnym temperaturowo, najlepiej w tylnej części, daleko od drzwi.
- Pokarm może być przechowywany 3 do 4 miesięcy w zamrażarce lub zamrażalniku. Należy go umieścić w centralnej części zamrażalnika gdzie temperatura jest najbardziej stabilna.
- Przed użyciem pokarm należy wyjąć z lodówki lub zamrażalnika i podgrzać go poprzez umieszczenie np. podgrzewaczu do butelek/słoeczków TUFI. Po podgrzaniu pokoiłyśać butelką z pokarmem w celu wyrównania temperatury.
- Podgrzewanie pokarmu w kuchenkach mikrofalowych nie jest zalecane.

JAK CZYŚCIĆ I STERYLIZOWAĆ

Przed użyciem odciągacza wszystkie elementy **mające kontakt z mlekiem**, powinny być czyszczone i sterylizowane:

Lejek, Filtr, Zawór, Butelka, Nakrętka, Dysk, Smoczek, Osłona smoczka. Maksymalna dopuszczalna temperatura sterylizacji to 100°C.

Powyższe elementy odciągacza powinny być dokładnie umyte, a następnie

ZESTAW ZAWIERA



- 1 Korpus (pompa)
- 2 Lejek (PP)
- 3 Filtr (PP) z Membraną (silikon)
- 4 Zawór (silikon)
- 5 Dren (PP)
- 6 Zasilacz

Wszystkie elementy stykające się z mlekiem są 0% BPA i podlegają sterylizacji max w 120°C



- 7 Butelka (PP)
- 8 Nakrętka do butelki (PP)
- 9 Dysk zabezpieczający (PP)
- 10 Smoczek (Silikon)
- 11 Osłona smoczka (PP)

MONTAŻ

Widok złożonego zestawu.



1. Złożenie zestawu osobistego.
2. Podłączenie zestawu osobistego do laktatora. Uwaga!- Istnieje możliwość podłączenia dwóch zestawów osobistych.
3. Podłączenie zasilacza.
4. Jak zmodyfikować zestaw osobisty na laktator ręczny.

WSTĘP

Pokarm kobiecy jest substancją unikalną, spełnia warunki swoistego gatunkowo, idealnego pokarmu. Karmienie piersią, zgodnie ze współczesną wiedzą, jest jedynym sposobem żywienia niemowląt i małych dzieci zapewniającym im optymalny stan zdrowia i rozwój. Niesie korzyści zdrowotne zarówno dla matki jak i dla dziecka, a także dla rodziny i całego społeczeństwa.

PRZEZNACZENIE

Elektryczny laktator Spectra S2 jest łatwym w użyciu urządzeniem służącym do odciągania pokarmu. W zestawie znajdują się wszelkie akcesoria niezbędne do odciągnięcia, przechowywania i podania dziecku pokarmu. Spectra S2 jest przeznaczona dla kobiet karmiących i odciągających nagromadzony pokarm, co sprzyja prawidłowej laktacji. Zapobiega powstawaniu zastoju pokarmu oraz zatkania przewodów mlecznych, co może prowadzić do powstania zapalenia a następnie ropnia piersi. Przydatny przy podrażnionych, popękanych oraz bolesnych brodawkach. Systematyczne stosowanie odciągacza pokarmu pobudza proces laktacji.

OSTRZEŻENIA

- * Czyścić i sterylizować produkt zgodnie z instrukcją obsługi.
- * Wyłączyć z sieci zaraz po użyciu.
- * Nie używać produktu w środowisku wilgotnym, nie zanurzać w wodzie.
- * Nie używać w trakcie kąpieli.
- * Chronić przed upadkiem.
- * Nie pozostawiać odciągacza w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, nasłonecznione okna, itp.
- * Przetrzywać poza zasięgiem dzieci.
- * Korpus odciągacza (pompa), nie zawiera żadnych elementów wymagających serwisowania i nie należy go rozkręcać. Zerwanie plomb oznacza utratę gwarancji.
- * Zabrania się stosowania zamiennie elementów wyposażenia laktatora innych, niż zalecane przez wytwórcę. W przypadku uszkodzenia elementu składowego, należy zastosować wyłącznie element zamienny zalecany przez wytwórcę. Ma to zastosowanie również do uszkodzeń związanych ze starzeniem się materiałów.
- * Uszkodzony przewód sieciowy lub wtyczkę, należy bezzwłocznie wymienić w punkcie serwisowym.
- * Przed każdym użyciem należy dokonać przeglądu w odniesieniu do: kompletności elementów składowych, uszkodzeń elementów składowych.
- * Zabrania się używania laktatora w przypadku niekompletności jego elementów składowych.

wygotowane do 10 minut. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując do sterylizacji Sterylizator Parowy SMART TUFI.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ODCIĄGANIA POKARMU

Nagrzewanie piersi:

1. Umyć ręce.
2. Umyć brodawkę i piers wokół niej.
3. Zamoczyć czysty ręcznik w wodzie około 40°C.
4. Wykręcić i uformować prostokąt.
5. Począć aż ostygnie do temperatury ciała (36-37°C)
6. Rozłożyć na piersiach na około 2 minuty.
7. Powtórzyć 4-5 razy.


MASAŻ PIERSI



Przed rozpoczęciem masażu należy umyć ręce.

BRODAWKA

używając kciuka i palca wskazującego delikatnie ścisnąć sutek z góry i z dołu i poruszać delikatnie do przodu i do tyłu w górę i w dół.

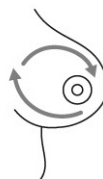

PIERS

czterema palcami (bez kciuka) masować piersi okrężnie przez około 5-6 minut. Nie należy uciskać twardych partii piersi.